

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wersja 1.1

Nosze ewakuacyjne MSTS

ResQline

Henrykowska 9, Warszawa 03-079

NIP: 524-29-04-742

REGON: 386713910

NCAGE: 9ABAH

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja określa zasady bezpiecznego użytkowania noszy ewakuacyjnych MSTS. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji przed użyciem produktu.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia oraz wyłączenia odpowiedzialności producenta.

2. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Nosze ewakuacyjne MSTS przeznaczone są wyłącznie do doraźnej ewakuacji osoby poszkodowanej poprzez:

- ewakuacji poprzez przenoszenie,
- ewakuacji poprzez przeciąganie po podłożu.

Produkt przeznaczony jest do użycia w sytuacjach zagrożenia.

Produkt:

- nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów UE,
 - nie jest przeznaczony do prowadzenia czynności medycznych,
 - nie jest przeznaczony do długotrwałego transportu pacjenta,
 - nie jest przeznaczony do transportu w pojazdach bez dodatkowych systemów mocowania,
 - nie jest przeznaczony do podnoszenia przy użyciu urządzeń mechanicznych,
 - nie jest przeznaczony do ewakuacji pionowej.
 - nie zabezpiecza poszkodowanego przed upadkiem.
-

3. CHARAKTER JEDNORAZOWY

Nosze MSTS są produktem jednorazowego użytku.

Po pierwszym użyciu produkt należy bezwzględnie wycofać z użytkowania i zutylizować.

Ponowne użycie produktu odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika i powoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta.

4. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe: 150 kg

Limit dotyczy użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (przenoszenie / przeciąganie) przy równomiernym rozłożeniu ciężaru na wszystkie uchwyty.

Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może skutkować uszkodzeniem produktu oraz zagrożeniem dla osoby ewakuowanej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie powyżej wskazanego limitu.

5. WYMAGANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA

Produkt może być używany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie ewakuacji osób poszkodowanych.

Użytkownik zobowiązany jest do:

- oceny masy osoby ewakuowanej,
 - oceny warunków terenowych,
 - zapewnienia odpowiedniej liczby osób do przenoszenia,
 - stosowania technik bezpiecznego podnoszenia.
-

6. KONTROLA PRZED UŻYCIEM (OBOWIĄZKOWA)

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wizualną produktu.

Należy sprawdzić w szczególności:

- integralność materiału,
- stan szwów,
- uchwyty i punkty chwytu,
- brak rozdarć, przetarć, przecięć lub deformacji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produkt nie może być używany.

Użycie produktu bez uprzedniej kontroli odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

7. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Nie stosować:

- w kontakcie z otwartym ogniem,
 - w temperaturach przekraczających 40 °C,
 - w środowisku chemicznie agresywnym,
 - na ostrych krawędziach bez zabezpieczenia,
 - jako elementu systemów linowych lub podnośników,
 - jako stałego środka transportu medycznego.
-

8. PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać:

- w suchym miejscu,
- z dala od promieniowania UV,
- w temperaturze od 10°C do 25 °C,
- bez kontaktu z substancjami chemicznymi.

Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do degradacji materiału.

9. ZAKAZ MODYFIKACJI

Wszelkie modyfikacje produktu, w tym ingerencja w konstrukcję, doszywanie elementów, wymiana komponentów lub użycie nieoryginalnych części powodują wyłączenie odpowiedzialności producenta.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady produktu wynikające z błędów produkcyjnych przy użytkowaniu zgodnym z niniejszą instrukcją.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- przekroczenia dopuszczalnego obciążenia,
- braku kontroli przed użyciem,
- ponownego użycia produktu,
- modyfikacji konstrukcji,
- użycia przez osoby nieprzeszkolone,

- użytkowania w warunkach wykraczających poza określone w instrukcji.

Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do wartości zakupionego produktu, z wyłączeniem szkód pośrednich oraz utraconych korzyści, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

11. UTYLIZACJA

Po użyciu produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych lub odpadów powstałych w działaniach ratowniczych.

12. KONTAKT W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa produktu prosimy o kontakt:

+48 22 612 25 77

+48 694 709 889

info@resqline.com